

5 års garanti
for præcis
insulindosering



NovoPen® 4

- 5 års garanti for præcis insulindosering – gennemtestet insulinpen fra Novo Nordisk
- Passer til alle insuliner i Penfill® fra Novo Nordisk
- Findes i farverne sølv og blå

Valg af insulinbehandling træffes sammen med behandler.

Læs brugermanualen, som følger med æsken, for en mere detaljeret vejledning om NovoPen® 4.

Besøg også Altomdiabetes.dk og Novonordisk.dk

Stol på dit udstyr



Miniguide



Novo Nordisk Scandinavia AB
Arne Jacobsens Allé 15
2300 København S
Tlf.: +45 45880800
Fax: +45 45883200
scandinavia@novonordisk.com
www.altomdiabetes.dk
www.novonordisk.dk

NovoPen® 4
The reliable choice



NovoPen® 4
The reliable choice

• Se

Tre gange større dosisvælger.*
Let at aflæse for korrekt indstilling.

• Mærk

Halvt så mange kræfter for at injicere.* Kort stempelgang sikrer hurtig dosering.

• Hør

Tydeligt klik når injektionen er fuldført.


– forskellen.

*I forhold til NovoPen® 3

Kom igang med NovoPen® 4



1. Gør NovoPen® 4 klar til brug. Træk hættten af pennen og skil pennen ad ved at skrue stempeldelen af ampulholderen.

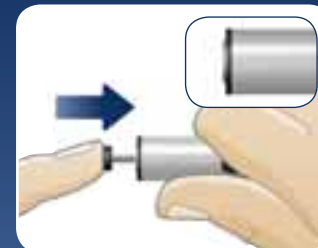

2. Tryk stempelstangen ind, hvis den ikke allerede er helt i bund.




3. Læg Penfill® ampullen i ampulholderen med den farvede del først.




4. Skru stempeldelen på igen og sæt NovoFine®-nålen på. NovoPen® 4 er nu klar til brug.

Injicér med NovoPen® 4

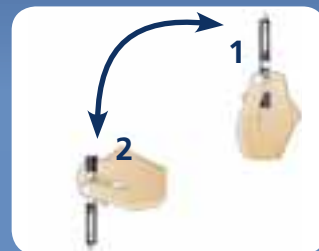

5. Afhængig af hvilken insulintype, der bruges, bør pennen rulles og/eller vendes inden luftskud.

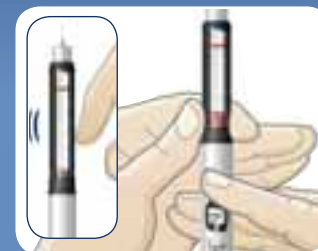

6. Lav luftskud. Træk ud i endeskruen og drej:
• 4 enheder for en ny Penfill® ampul
• 1 enhed for en ampul der er i brug
Sprøjt ud. Kommer der ikke en dråbe insulin til syne på nålens spids, gentages proceduren.



7. Indstil dosis ved at trække ud i endeskruen og dreje ønsket dosis.



8. Løft en hudfold og injicér. Hold nålen i huden i 6 sekunder efter, at knappen er trykket helt i bund, og dosisskalaen er returneret til 0. Et "klik" indikerer, at injektionen er fuldført.

